


Λίστα Ελέγχου Χρονομέτρου Timer Check List


ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1): WHEN MOUNTED CORRECTLY (CHECKLIST 1):

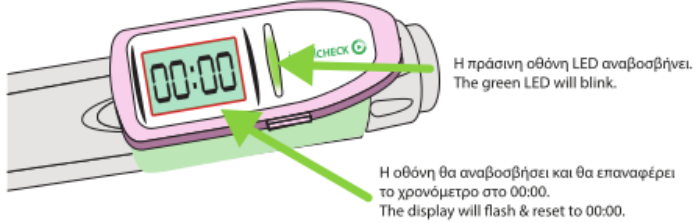

- ▶ Εάν μετά τη συναρμολόγηση, ή μετά την ολοκλήρωση της έγχυσης, η οθόνη του InsulCheck δεν αναβοσβήνει ή το πράσινο φως δεν αναβοσβήνει, ελέγξτε αν έχει τοποθετηθεί σωστά η συσκευή και επανασυναρμολόγησε χρησιμοποιώντας τις οδηγίες που παρέχονται.
- ▶ Αν το πρόβλημα επιμένει, η InsulCheck συσκευή σας μπορεί να είναι ελαττωματική και θα πρέπει να την επιστρέψετε προς αντικατάσταση.
- ▶ If after assembly, or on injection completion, your InsulCheck display does not flash or the green light does not blink, check if it is mounted correctly and reassemble using the instructions provided.
- ▶ If the problem persists, your InsulCheck may be faulty and you should return it for a replacement.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ (ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 2): TIMER FITTING (CHECKLIST 2):

Ελέγξτε ότι η συσκευή εφαρμόζει και στις 2 εσοχές του επαφόμενου περιβλήματος.
Check timer is on both rails of sleeve.

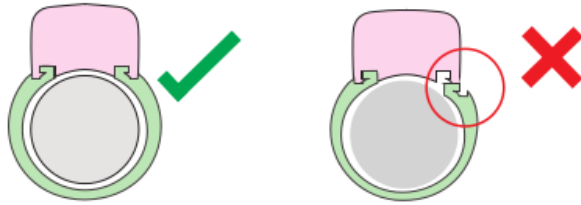

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ (ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 3): TIMER FITTING (CHECKLIST 3):


Ελέγξτε ότι το χρονόμετρο εφαρμόζει πλήρως στο περιβλήμα.
Check timer is fully on sleeve.



Λίστα Ελέγχου του περιβλήματος Sleeve Checklist


ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ALIGN SLEEVE WINDOW:

Ελέγξτε αν το περιβλήμα είναι ευθυγραμμισμένο με το παράθυρο ένδειξης δόσολογίας.
Check sleeve is aligned correctly with dosage window.

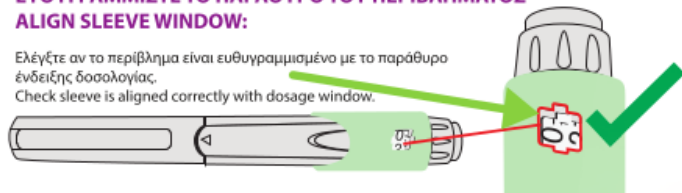


ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ CHECK SLEEVE ALIGNMENT:

Ελέγξτε αν το περιβλήμα είναι ευθυγραμμισμένο στην άκρη της πέννας.
Check sleeve is lined up exactly with edge of pen.

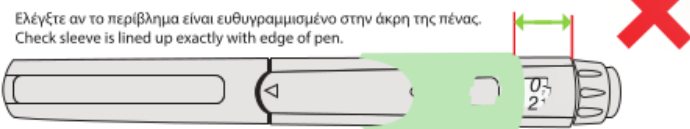


Περιστρέψτε το περιβλήμα αν δεν είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με το παράθυρο ένδειξης δόσολογίας.
Rotate sleeve if not aligned with dosage window.

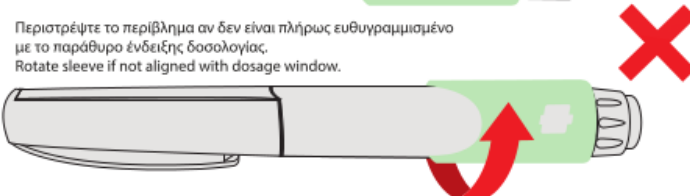


Αφαίρεση της συσκευής Device removal



Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στο πλάι του χρονόμετρου ώστε να απελευθερώσετε το χρονόμετρο InsulCheck.
Press and hold button at side of timer, to release InsulCheck timer.

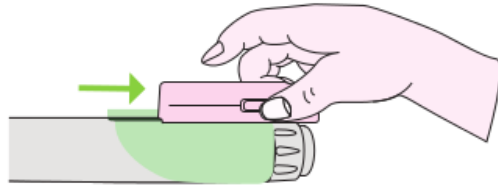

Τραβήξτε σταθερά προς την κατεύθυνση που βλέπετε στη φωτογραφία και το χρονόμετρο InsulCheck θα γλιστρήσει στις εσοχές του περιβλήματος.
Pull firmly in direction shown and the InsulCheck timer will then slide from sleeve rails.

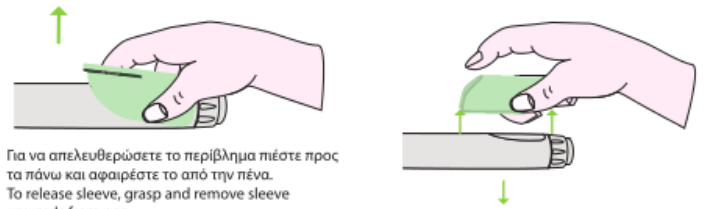

Για να απελευθερώσετε το περιβλήμα πιέστε προς τα πάνω και αφαιρέστε το από την πένα.
To release sleeve, grasp and remove sleeve upwards from pen.

Αλλαγή μπαταρίας Changing battery

Αν η οθόνη φαίνεται ξεθωριασμένη ή η οθόνη LED φαίνεται αμυδρά ή δεν αναβοσβήνει τότε η μπαταρία έχει εξασθενήσει.

If the display is faint or the LED is dim or does not blink the battery may be flat.

Η μπαταρία της συσκευής InsulCheck αντικαθίσταται πολύ εύκολα.

The battery in your InsulCheck is very easy to replace.

Ο προτεινόμενος τύπος μπαταρίας είναι 1.5V LR54 ή άλλος παρόμοιος.

The recommended battery is a 1.5V LR54 button cell or equivalent.



Προσοχή. Disclaimer.

- ▶ Χρησιμοποιήστε το μόνο ως επιβεβαίωση «του χρόνου που έχει παρέλθει από την τελευταία έγχυση». Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της δόσολογίας. Το χρονόμετρο InsulCheck απαιτεί την ελάχιστη δόση έγχυσης για να λειτουργήσει με επιτυχία σε ορισμένες πένες. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αναφερθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.insulcheck.com/supported-pens. Για καθοδήγηση σχετικά με τον διαβήτη να συμβουλευέστε πάντα τον γιατρό σας.
- ▶ Use for confirming "time of last injection" only. Not to be used to determine dosage. The InsulCheck timer requires a minimum injection dosage to operate successfully on some pens. Please see www.insulcheck.com/supported-pens. For guidance with diabetes always consult your doctor.