

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το InsulCheck. Thank you for choosing InsulCheck.

- ▶ Το InsulCheck εφαρμόζει σε δευτερόλεπτα πάνω στην πένα ινσουλίνης σας.
- ▶ Η μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη δείχνει το χρόνο που έχει παρέλθει από την τελευταία έγχυση προσφέροντας ασφάλεια και σιγουριά στον προγραμματισμό των εγχύσεων σας.
- ▶ Μόλις το InsulCheck συναρμολογηθεί σωστά, μπορείτε να συνεχίσετε τις εγχύσεις ως συνήθως.
- ▶ Όταν ολοκληρωθεί η έγχυση η οθόνη επιβεβαίωσης LED θα αναβοβρόησει, η οθόνη θα επανέλθει στο 00:00 και στη συνέχεια θα ξεκινήσει να μετρά ξανά.
- ▶ Τώρα με τη δυνατότητα αντικατάστασης της μπαταρίας το InsulCheck σας προσφέρει ασφάλεια και άνεση για χρόνια καθώς θα γνωρίζετε πάντα πότε πραγματοποιήσατε την τελευταία σας έγχυση.
- ▶ Insulcheck clips on in seconds to your Insulin pen.
- ▶ The large easy to read display shows the elapsed time since your last injection adding safety and certainty to your injection schedule.
- ▶ Once your InsulCheck is assembled correctly, you continue to inject as normal.
- ▶ When injection is completed, the Confirmation LED will blink and the display will reset to 00:00 and then start counting up.
- ▶ Now with a replaceable battery your InsulCheck will give years of peace and comfort always knowing when you last injected.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ INSULCHECK. USING YOUR INSULCHECK.

Το InsulCheck αποτελείται από δυο μέρη, τη συσκευή που περιέχει το ηλεκτρονικό μέρος και το περίβλημα που εφαρμόζει πάνω στην πένα ινσουλίνης σας. Your InsulCheck comes in two parts, the Header which contains the electronics and the pen specific sleeve that attaches to your pen.

ΘΩΟΝΗ:

Δείχνει το χρόνο που έχει παρέλθει (ωω: λλ) από την τελευταία έγχυση.

DISPLAY:

Shows Elapsed time in (HH:MM) since last injection.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΩΟΝΗΣ LED:

Αναβοβρόηει για να δείξει ότι έχει ανιχνευθεί έγχυση και το χρονόμετρο μηδενίζεται.

CONFIRMATION LED:

Blinks to show injection is detected and timer is reset.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ:

Πατήστε το κουμπί για να απελευθερώσετε το χρονόμετρο από το περίβλημα.

RELEASE:

Press button to release timer from sleeve.



ΕΣΟΧΕΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ:

Βεβαιωθείτε ότι το χρονόμετρο είναι συνδεδεμένο στις δύο εσοχές του περιβλήματος. (Δείτε το Βήμα 4)

SLEEVE RAIL:

Ensure the timer is attached to both sleeve rails. (See Step 4)

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ:

Θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με το παράθυρο ένδειξης δόσολογίας της πέννας.

SLEEVE WINDOW:

To be aligned with pen dosage window.



Το InsulCheck έχει εγγύηση 12 μηνών.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με InsulCheck παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@ambitashealthcare.com ή support@insulcheck.com.
Your InsulCheck is unconditionally guaranteed for 12 months.


If you have any questions about your InsulCheck please contact us at info@ambitashealthcare.com or support@insulcheck.com

Εφαρμόστε το InsulCheck στην πένα ινσουλίνης σας. Fitting Your InsulCheck to your Pen.

Βήμα 1 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ: Step 1 CHOOSING YOUR SLEEVE:

Επιλέξτε το περίβλημα που αντιστοιχεί στην πένα ινσουλίνης που χρησιμοποιείτε. Υπάρχει συγκεκριμένο περίβλημα για κάθε τύπο πέννας ινσουλίνης. Βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα στο περίβλημα ταιριάζει με την πένα σας.
Choose the sleeve that corresponds with the target insulin pen that you use. There is a specific sleeve for each pen type. Check that the label on the sleeve matches your pen.


Βήμα 2 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ: Step 2 LINE UP SLEEVE:

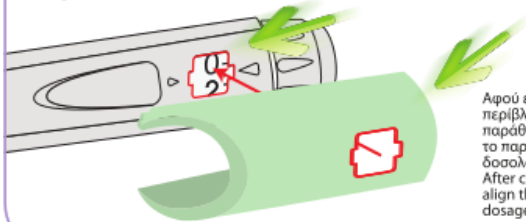

Αφού επιλέξετε το σωστό περίβλημα, ευθυγραμμίστε με το παράθυρο ένδειξης δόσολογίας της πέννας.
After choosing the correct sleeve, align the sleeve window with pen dosage window.

Βήμα 3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ: Step 3 MOUNT SLEEVE:


Πιέστε το περίβλημα προς τα κάτω, για να εφαρμόσει πάνω στην πένα ινσουλίνης.
Press sleeve down onto insulin pen.

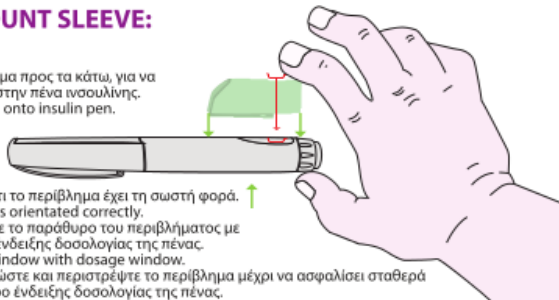


- ▶ Βεβαιωθείτε ότι το περίβλημα έχει τη σωστή φορά.
Ensure sleeve is orientated correctly.
- ▶ Ευθυγραμμίστε το παράθυρο του περιβλήματος με το παράθυρο ένδειξης δόσολογίας της πέννας.
Align sleeve window with dosage window.
- ▶ Πιέστε, κομπώστε και περιστρέψτε το περίβλημα μέχρι να ασφαλίσει σταθερά με το παράθυρο ένδειξης δόσολογίας της πέννας.
Push, click and rotate sleeve until it locks firmly to pen dosage window.

Βήμα 4 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ INSULCHECK: Step 4 ATTACHING INSULCHECK TIMER:

Ευθυγραμμίστε το χρονόμετρο και σύρετε πάνω στο περίβλημα.
Align timer and slide onto sleeve.

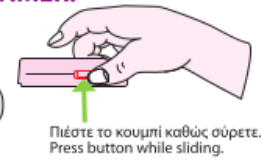

Πιέστε το κουμπί καθώς σύρετε.
Press button while sliding.

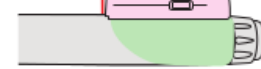

Βεβαιωθείτε ότι το χρονόμετρο σύρεται πάνω στις εσοχές του περιβλήματος. Πιέστε σταθερά προς την κατεύθυνση που δείχνει η εικόνα.
Ensure timer slides onto both rails of sleeve. Push firmly in direction shown.

Σύρετε το χρονόμετρο μέχρι να έχει τοποθετηθεί πλήρως. Όταν έχει τοποθετηθεί σωστά το χρονόμετρο θα κάνει κλικ και θα κομπώσει σταθερά πάνω στην πένα.
Slide timer until it is fully mounted. When positioned correctly, the timer will click and lock firmly onto pen.

Βήμα 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ INSULCHECK: Step 5 ACTIVATING INSULCHECK TIMER:

- ▶ Η συσκευή σας είναι τώρα ενεργοποιημένη.
Your device is now active.
- ▶ Απορρίψτε την ταινία.
Discard Strip.



- ▶ Για να ενεργοποιήσετε το InsulCheck για πρώτη φορά, τραβήξτε την ταινία ασφαλείας. To activate your InsulCheck for the first time, pull out battery saving strip.